


## 一次性使用结扎装置 (HX-400U-30)

### 快速参考指南

**注意:**本指南仅为HX-400U-30 PolyLoop的使用说明摘要。请务必遵循随产品附带的奥林巴斯内镜治疗PolyLoop HX-400U-30的使用说明书。

#### 部件名称




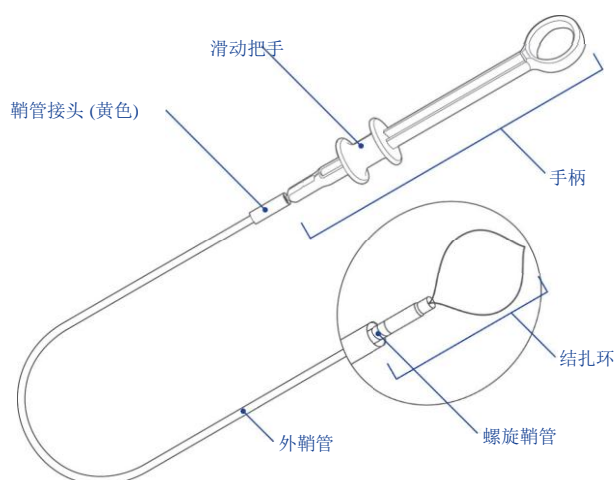


#### 准备

1. 向前推动鞘管接头，将结扎环收回外鞘管。 将本器械小心地插入钳子管道开口阀。



#### 操作

2. 拉动鞘管接头至触至手柄，从外鞘管中伸出结扎环。

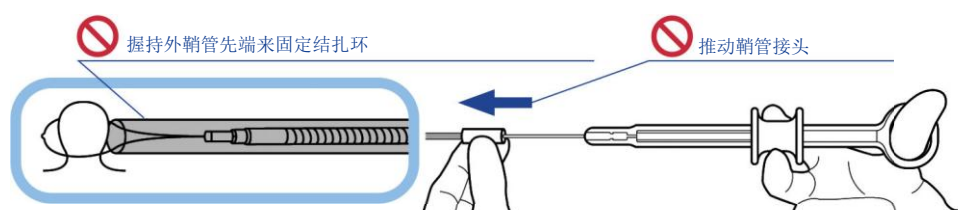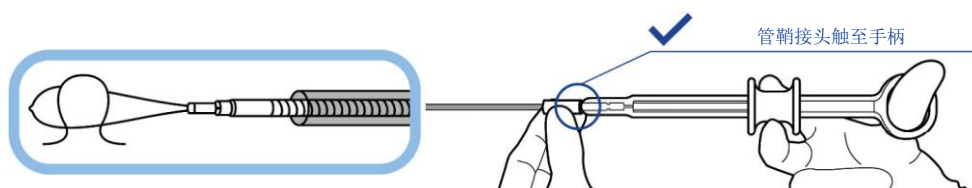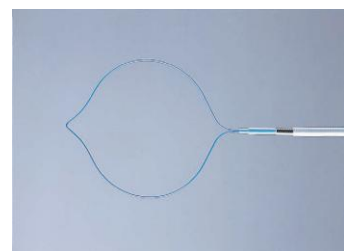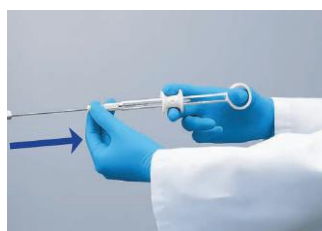

3. 将打开的结扎环套在组织上。拉动滑动把手，结扎目标组织。







**注意:** 结扎手术过程中，请勿过度用力操作结扎环

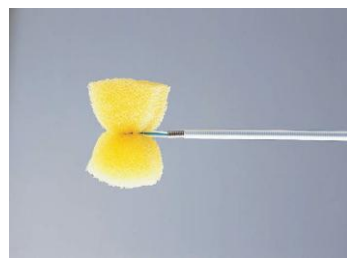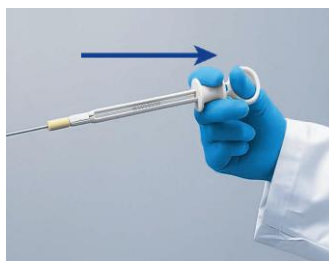

4. 推动滑动把手到头，从螺旋鞘管中伸出挂钩。从挂钩上分离结扎环。

**注意:** 螺旋鞘管未伸出外鞘管时，请勿将结扎环从挂钩上移除。

**注意:** 请确保外鞘管近端抵住手柄，并与内镜钳子管道开口阀保持伸直。

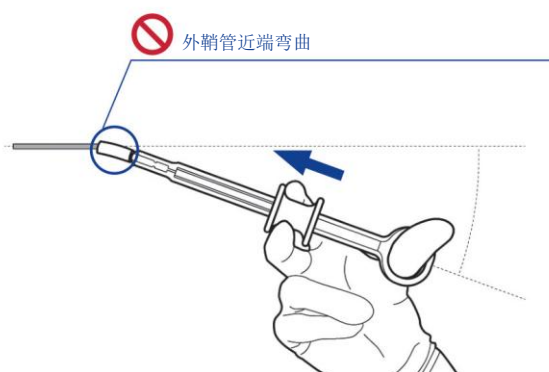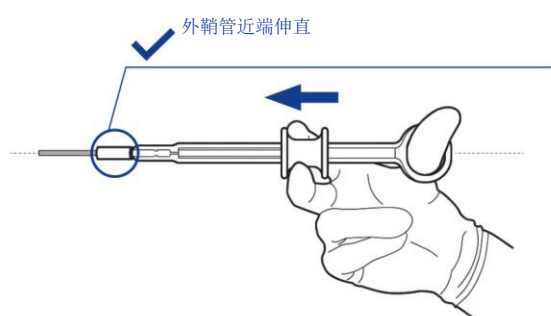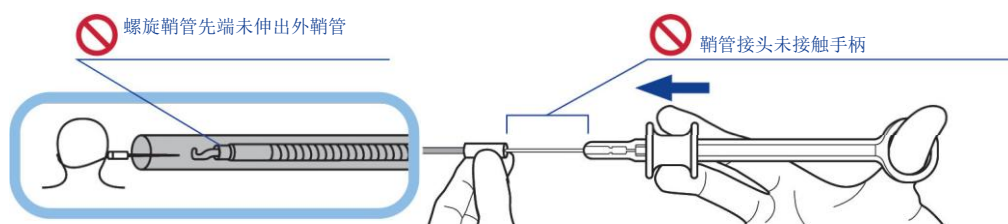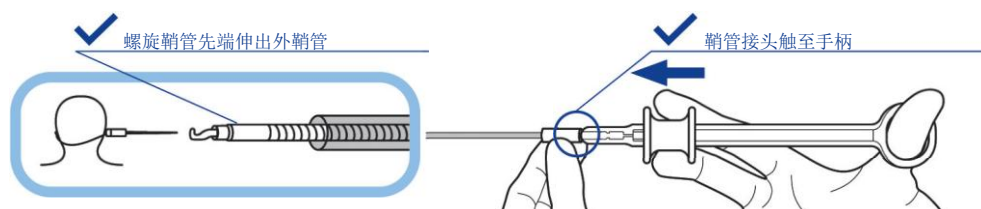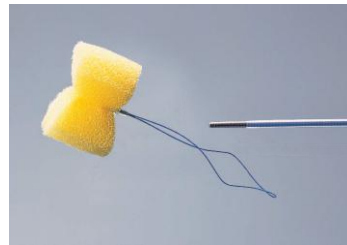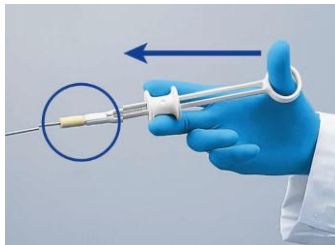

#### 参考:

务必准备好奥林巴斯结扎线剪刀、钳子或切断用具，以便结扎环不能从器械上分离时切断螺旋鞘管、外鞘管和操作丝。




## 紧急处理

如果结扎环不能从本器械上分离，请按照本节所述步骤进行处理。


### 1. 伸直露在患者体外的内镜部分。

- 伸直本器械露在钳子管道开口阀外的部分
- 推动滑动把手到头，从螺旋鞘管中伸出挂钩

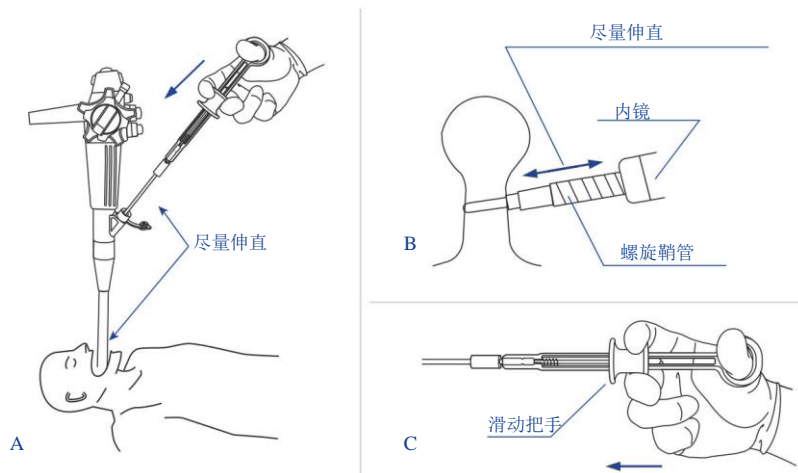


### 2. 用钳子或其它切断用具将外鞘管、螺旋鞘管和操作丝切断。

- 抽出内镜。

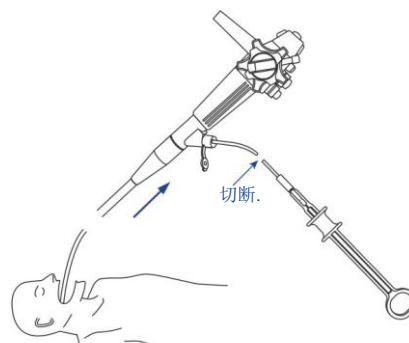

### 3. 当螺旋鞘管的先端不靠近结扎环卡锁时

- 沿外鞘管再次插入内镜。
- 用结扎线剪刀切断结扎环。
- 将外鞘管、螺旋鞘管和操作丝一起抽出。

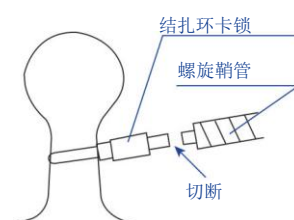

### 当螺旋鞘管的先端靠近结扎环卡锁时

- 将结扎环留在原处，直到组织坏死，结扎环和组织脱落。这需要一段时间。
- 实施外科手术或其它可行的治疗措施。